

使用方式

(1)被照護者要先購買符合我們 APP 設計的血氧機，並依使用方法配戴好，將血氧心跳數據能正確傳輸到手機中，因為要配合雲端電腦在異常時告訴病人或照顧者的功能，手機要用 iOS 15 或 Android 10 以上的機種，否則可能不能正常使用

配合雲端電腦 APP 使用的血氧計廠牌有

<http://www.nci-md.com/po11.html>

(2)打開被照護者手機的 Bluetooth 功能

(3) 加入我們的 APP

(4)請將被照護者及異常時需通知的照護者的手機號碼(可多人) EMAIL 告知我們，我們在登錄完成後會 EMAIL 通知被照護者及照護者

(5)我們在登錄好被照護者及照護者的手機號碼(可多人)後，就可以開始使用

我們公司提供雲端電腦登錄及 10 年的使用

使用範例

(1) 在急診室的病人，帶上血氧機，有了雲端 ICU，只要有異常血氧或心跳，可立即藉由雲端電腦經手機告知護理人員或家屬，可及時給病人協助

(2)開刀過後的病人，在急性期，有了雲端 ICU，家屬可不必隨時在身邊，只要有異常血氧或心跳，可立即藉由雲端電腦經手機告知護理人員或家屬，增加病人的安全性

(3)若在家有臥床病人，有了雲端 ICU，照護者可不必隨時在身邊，只要有異常血氧或心跳，可立即藉由雲端電腦經手機告知，增加病人的安全性及減少照護者的緊張度

(4)在安養院臥床的病人，晚上睡覺時戴上血氧機，若有任何異常，可藉由雲端電

腦經手機告知護理人員，減少查房的頻率，增加病人的安全性

(5)對感染新冠肺炎的病人，在急性期(約 7 天)，若擔心病情惡化，延誤就醫，或有快樂性缺氧，本系統的血氧心跳即時警告功能，可幫助需就醫與否的參考