

## 使用方式及費用

- (1) 獨居老人家中要先有 WIFI 無線網路連結, 購買我們特殊設計的 3 種移動偵測 sensors 及 receiver set
- (2) 依使用說明, 將吊帶 Sensor (Necklace sensor)掛於獨居老人身上, 將大門感應 sensor 固定在房間出入門上, 廁所馬桶感應 sensor 放在馬桶裡面
- (3) 開啟 SENSORS 的電源開始使用, 並將 sensor 及 receiver 的序號以 EMAIL 告知我們
- (4) 請將獨居老人及異常時需通知的照護者的手機號碼告知我們, 我們在登錄完成後會 EMAIL 通知獨居老人及照護者

我們公司提供雲端電腦登錄及本系統提供 10 年使用

我們會請電腦公司人員協助將 receiver set 接上家中 WIFI 無線網路 (藉由 TP LINK 的設定, 費用另計)

## 使用範例

- (1) 張先生在台北工作, 妹妹在高雄工作, 母親一個人住在台南鄉下, 兄妹對母親的健康情形雖很關心, 但除了常打電話外. 沒有其他更好的方法. 使用本系統後, 在母親有緊急情況時, 可藉由緊急按鈕的雲端通知, 做緊急的處理. 在母親 8 小時沒有活動, 沒有開門, 沒有上廁所時, 藉由雲端電腦偵測到無活動警示通知兄妹或照護者, 做適當的處置, 兄妹可以安心工作, 在母親有異常時, 也可第一時間處理. 母親也可安心住在自己家, 在有問題時獲得適當協助
- (2)老人喜歡住在自己的家生活, 但有很多老人, 一方面是擔心萬一病了, 沒人知道而死亡, 子女也因無暇照顧而要求老人住到安養院, 使用本系統後,老人可安心住在自己的家裡, 若有異常時, 可以得到及時的照顧, 老人本人及子女都可以安心, 也可減少到養老院的花費及設立養老院的社會成本及人力
- (3)在老人配戴的 Necklace sensor 上有緊急按鈕, 在感覺不舒服時, 可按緊急按鈕, 只要在 receiver 的偵測範圍內,雲端電腦會將所在的位置立即通知照護者或子女, 做第一時間處理. 在急診室或醫院也可配置給病人, 在病人不舒服時, 立即讓護理人員知道, 做適當的處理.